



GAMME SitnStand

Portable Smart Rising Seats



Coussin releveur
pour siège
Réf : 825 100



Coussin releveur
pour fauteuil roulant
Réf : 825 102

Pour une plus grande indépendance

Le coussin releveur SitnStand permet à l'utilisateur de s'asseoir et de se relever seul, en toute sécurité et en douceur.

Ce matériel est aussi une aide précieuse pour les soignants et les aidants, en permettant de prévenir les TMS.

Son utilisation est très simple, grâce à un boîtier de commande et un petit compresseur sur batterie qui assure le gonflage de l'assise, à hauteur ajustable selon les besoins.

Ce coussin est disponible en deux versions :

- pour tous les différents types de siège
- pour fauteuil roulant

Caractéristiques techniques communes :

- Temps gonflage/dégonflage de l'assise : env. 20 sec
- Mécanisme de contrôle : bouton poussoir ↑ et ↓
- Capacité gonflage: 1.7L/sec
- Nombre de niveaux de gonflage : 3 pour la version fauteuil roulant et 4 pour la version siège.
- Type de batterie : Lithium Ion 14,4V - 2,6 Ah
- Capacité batterie : 300 cycles
- Autonomie : minimum 50 gonflages (*chargement batterie conseillé tous les 4 à 6 jours*)



COUSSIN RELEVEUR POUR SIÈGE SITNStand

DIMENSIONS ET POIDS :

- Assise dégonflée : 40x53x1 cm
- Assise gonflée : 40x48x25 cm
- Hauteur de levage maximum : 20 cm
- Sac de transport (inclus) : 42x54x14 cm
- Poids : 3,7 kg (4,2kg avec sac)
- Capacité : 120 kg

Le coussin releveur pour siège SitnStand se pose sur la majorité des chaises, fauteuils, salons de jardin etc. Vous pouvez l'utiliser partout, aussi bien à domicile, que lors des déplacements .



Pour s'asseoir, s'installer confortablement au centre du coussin et pressez la flèche ↓. L'assise va se dégonfler lentement.

Pour se relever, détachez le dos du dossier, placez les pieds près du siège, écartez les et appuyez sur la flèche ↑ pour lancer le gonflement de l'assise. Quand la position désirée est atteinte, on peut se redresser.



RECOMMANDATIONS :

- Ce dispositif convient aux personnes pouvant se déplacer seules.
- Lorsque vous êtes assis dans le fauteuil vos pieds doivent toucher facilement le sol.
- Veuillez à placer le SitnStand au plus profond du fauteuil.
- Pour un meilleur confort, il est possible de placer un oreiller entre le dossier du fauteuil et le dossier du coussin releveur.

Le coussin releveur SitnStand, de nombreux avantages en complément de l'utilisation d'un fauteuil releveur standard !	Fauteuil releveur Standard 	Coussin releveur SitnStand 
Peut se transporter à l'extérieur ?	NON	OUI
S'adapte à tous les types de fauteuil ?	NON	OUI
Fonctionne à l'aide d'une batterie ?	NON	OUI
S'agit-il d'un dispositif médical ?	NON	OUI
Se nettoie facilement ?	OUI	OUI
Hauteur de levage ajustable ?	OUI	OUI

Disponible à partir de
septembre 2022

COUSSIN RELEVEUR POUR FAUTEUIL ROULANT SITNSTAND

DIMENSIONS ET POIDS :

- Assise dégonflée : 40x45x6 cm
- Assise gonflée : 40x45x20 cm
- Largeur assise : 45 cm
- Hauteur de levage maximum : 16 cm
- Sac de transport (en option) : 42x54x14 cm
- Poids : 3,5 kg (avec carton 4kg)
- Capacité : 120 kg

Le coussin releveur pour fauteuil roulant manuel SitnStand se pose sur la majorité des modèles de fauteuil roulant. Il est fourni avec un coussin à mémoire de forme viscoélastique pour un meilleur confort.



L'installation du coussin est facile, il suffit de poser le SitnStand plié sur le siège du fauteuil roulant et de glisser la partie arrière (celle qui contient l'unité d'alimentation) entre le dossier et le siège. Ensuite, placez les sangles de la partie arrière sur les poignées du fauteuil roulant et serrez les.



Sans le SitnStand



Avec le SitnStand



Pour s'asseoir, actionner les freins du fauteuil roulant, s'installer confortablement au centre du coussin et presser la flèche ↓. L'assise va se dégonfler lentement. Pour se relever, actionner les freins du fauteuil roulant, enlever vos pieds du repose-pieds et placer les près du fauteuil, se tenir droit, écartez ses pieds et appuyer sur la flèche ↑ pour lancer le gonflement de l'assise.

ACCESSOIRES SITNSTAND



Sac de transport



Housse de siège
additionnelle



Coussin à mémoire
de forme additionnel
(45x40x4cm)



Batterie
additionnelle



Chargeur
additionnel

Découvrez notre vidéo de démonstration :



Retrouvez nos différentes vidéos tutos :

- Installer le SitnStand
- S'asseoir et se relever avec le SitnStand
- Remplacer la batterie du SitnStand

En flashant le QR Code :




AXSOL
VERS UN MONDE ACCESSIBLE

45, avenue Georges Politzer - 78190 TRAPPES - France
Tél. : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - Email : infos@axsol.fr

www.axsol.fr